


INSTALLATION


Diese Anlage ist für das Zapfen von BacTerminator Wasser in Dental Flaschen Systeme.

Im Lieferumfang enthalten ist:

- Einheit mit Zapfhahn (Figur 1)
- Netzteil zur Stromversorgung (Figur 2)
- 5 m Verbindungsschlauch (Figur 3)

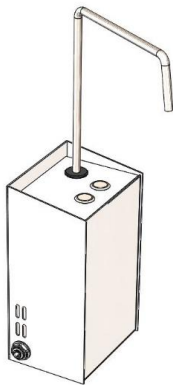

Figur 1, Zapfanlage

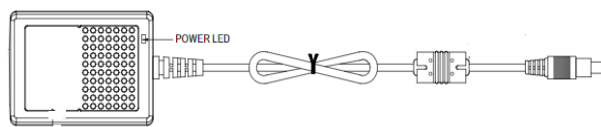

Figur 2, Stromversorgung



Figur 3, Schlauch

Installation:

- Stromversorgung vom Gerät trennen.
- Zapfanlage öffnen und die gewünschte Zapfmenge für jeden Knopf (Button) per DIP Schaltern einstellen (Seite 2). Berühren Sie die PCB nicht, es sei denn, es wurden ESD-Maßnahmen getroffen.
- Zapfanlage schließen
- Anschluss: 8mm schlauch
- Elektrische Anschluss: Externe 12VDC Stromversorgung.
- Etiketten mit der Wassermenge unter jeden Knopf aufbringen
- Zapfanlage und den BacTerminator Compact mit dem beigegefügten Wasserschlauch verbinden. BacTerminator Compact mit der Wasserversorgung verbinden.
(Bitte beachten Sie, dass der Anschluss an die Wasserversorgung fachgerecht ausgeführt werden muss!)
- Stromkabel wieder anschließen
- Die Zapfanlage ist jetzt bereit zum Einsatz.




Wasser aus dem BacTerminator Dental vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Einstellungen:

Darf nur von Autorisierten Technikern Installiert werden.

Die Anlage ist so einstellbar, dass die beiden Knöpfe unterschiedlichen Mengen von Wasser auf Knopfdruck erzeugen.

Folgende Einstellungen sind möglich:

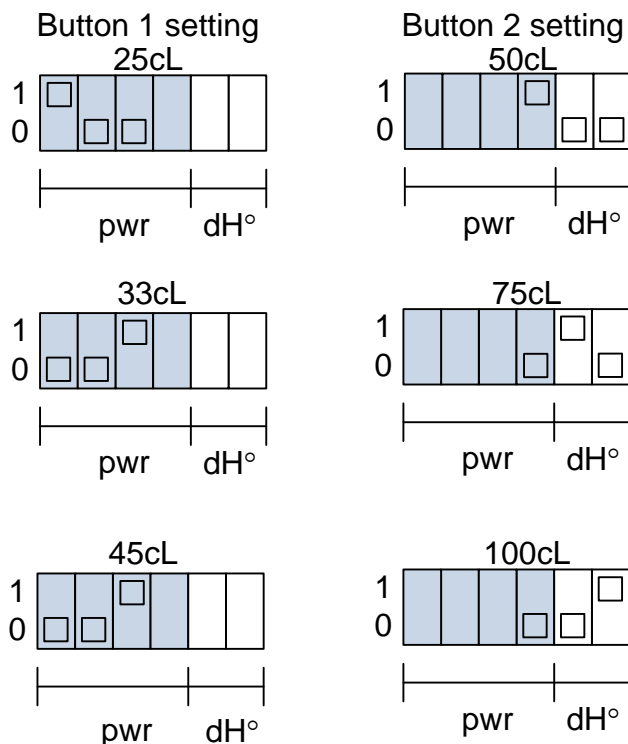

Stellen Sie die DIP Schalter nach den oben aufgeführten Vorgaben ein.


Durch Drücken der Knopf wird genau die eingestellte Menge an Wasser in die Flasche gezapft. Ein erneuter Druck auf den Knopf, führt zum sofortigen stoppen des Vorgangs.

Wasser aus dem BacTerminator Dental vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

BEDIENUNG

Dieser Einheit ist für den Zapfen von BacTerminator Wasser auf Dental Flaschen Systeme aller Art.

- Um Wasser zu ziehen, bitte einen Knopf betätigen.
- Um den Wasserzulauf vorzeitig zu stoppen, den Knopf noch einmal betätigen.
- Um eine variable Menge von Wasser zu zapfen, den Knopf gedrückt halten. Wird der Knopf nicht mehr gedrückt wird der Zapfvorgang sofort beendet.

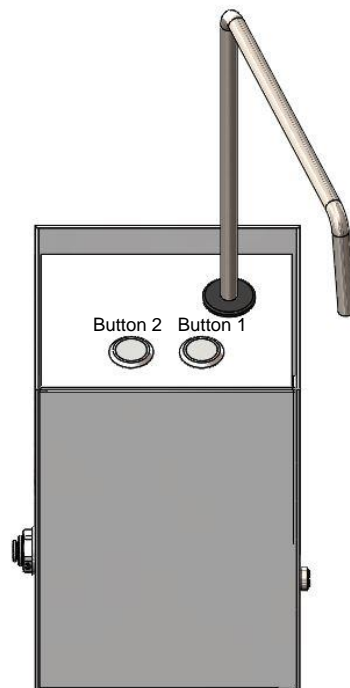

Adept Water Technologies A/S,
Ellekær 6, 2730 Herlev,
Dänemark

Wasser aus dem BacTerminator Dental vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

BacTerminator – Zapfanlage

Gebrauchsanleitung

Produkt-Nr. 160090

Zapfanlage für

BacTerminator Compact

Einstellbares Zapfsystem schnell und einfach
Bedienbar.

1 x Zapfanlage, 1 x Stromversorgung, 5 m Schlauch,

Bestell Nr.: 160093



BacTerminator Compact

Desinfektionssystem für die Zapfanlage

1 x Desinfektionsgerät & 1 x Vorfilter klein.

1 x Ultrafilter

Bestell Nr.: 150042



BacTerminator Compact Filter

Vorfilter für BacTerminator Compact

Bestell Nr.: Klein: 140007

Groß: 130025



BacTerminator Compact + Zapfanlage

Desinfektionssystem für die Zapfanlage

+ Einstellbares Zapfsystem

schnell und einfach Bedienbar.

1 x Desinfektionsgerät & 1 x Vorfilter klein.

1 x Zapfanlage, 1 x Stromversorgung, 5 m Schlauch,

Bestell Nr.: 160094



Wasser aus dem BacTerminator Dental vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.